



PhysioGate® PG 2000 - Kurzanleitung



Allgemeine Hinweise:

- Platzieren Sie alle Geräte nah beieinander und möglichst an einem Standort mit guter mobiler Datenanbindung.
- Sorgen Sie dafür, dass das Tablet immer ausreichend geladen ist.
- PhysioGate PG 2000 startet automatisch nach dem Einschalten des Tablets und läuft permanent im Hintergrund.

Vor der ersten Messung

- Schalten Sie den Bildschirm durch schnelles, doppeltes Tippen auf das Display oder kurzes Drücken der Ein/Aus-Taste (kleine Taste auf dem Rand) ein.

Messung Gewicht

- Stellen Sie die Waage auf einen festen Untergrund (kein Teppich).
- Steigen Sie mit beiden Füßen auf die Waage.
- Stehen Sie möglichst ruhig und ohne sich festzuhalten.
- Nachdem „STEP OFF“ angezeigt wird, steigen Sie bitte vorsichtig von der Waage.
- Das Messergebnis wird angezeigt und automatisch übertragen.



Messung Blutdruck

- Wickeln Sie die Manschette um den linken Oberarm und achten Sie dabei auf folgendes: Der Rand der Manschette soll etwa 2 bis 3 Zentimeter über dem Ellbogen liegen. Der Schlauch soll in Richtung Hand verlaufen.
- Schalten Sie das Gerät mit der großen Taste „Start“ ein. Das Gerät pumpt die Manschette auf und führt die Messung durch.
- Bleiben Sie während der Messung ruhig sitzen. Atmen Sie gleichmäßig. Sprechen Sie nicht.
- Die Messung ist beendet, wenn Ihr Blutdruck und Ihre Pulsfrequenz im Display angezeigt werden.
- Das Messergebnis wird angezeigt und automatisch übertragen.

Selbsteinschätzung zum Befinden starten

- Die Selbsteinschätzung des eigenen Befindens wird auf der Startseite durch Antippen auf das Feld „Befinden“ gestartet.
- Tippen Sie auf die Antwort-Schaltfläche, welche Ihrer Einschätzung zum derzeitigen Befinden entspricht.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche „Absenden“, um die Daten zu übertragen.



Hinweis: Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung der jeweiligen Geräte. **GETEMED Medizin- und Informationstechnik AG**

info@getemed.de / www.getemed.de



FRAGEN & ANTWORTEN

Nach einer Gewichts- oder Blutdruckmessung bleibt der Status blau. Was kann ich tun?

Verringern Sie die Distanz zwischen den Messgeräten und dem Tablet. Führen Sie anschließend eine erneute Messung mit dem Messgerät durch.
Sollte eine Übertragung trotz geringer Distanz nicht möglich sein, kontaktieren Sie bitte Ihre betreuende medizinische Einrichtung.

Nach der Messung wird der Übertragungsstatus rot. Was kann ich tun?

Gehen Sie an einen Ort mit einer besseren Internetverbindung. Starten Sie das Tablet neu und warten Sie. Es wird weiterhin versucht die Messwerte zu versenden.
Sollte eine Übertragung für mehr als 24 Stunden nicht möglich sein, kontaktieren Sie bitte Ihre betreuende medizinische Einrichtung.

Wie schalte ich das Tablet ein und aus?

Einschalten: Sie können das Tablet durch schnelles, doppeltes Tippen auf das Display oder kurzes Drücken der Ein/Aus-Taste einschalten.

Ausschalten: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste länger als 5 Sek. und folgen Sie der Anzeige auf dem Display.

Sollte ich das Gerät immer eingeschaltet lassen?

Ja, vor allem wenn die Daten noch nicht versendet wurden.

Darf ich wiederholt Messungen übertragen?

Ja.

Wie wechsele ich die Batterien von dem Blutdruckmessgerät, der Waage und dem SpO2 Gerät?

Öffnen Sie die Klappe auf der Rückseite des jeweiligen Gerätes, tauschen Sie die Batterien und verschließen Sie die Klappe. Achten Sie auf den gekennzeichneten "+" Pol und "-" Pol der Batterie.

Wie öffne und schließe ich das integrierte Handbuch?

Öffnen: Tippen Sie auf "Menü" und dann auf dieses Zeichen , um das integrierte Handbuch zu öffnen.

Schließen: Klicken Sie auf den Pfeil in der linken, oberen Ecke des Displays.